


# MEMOday

Art.nr 508260

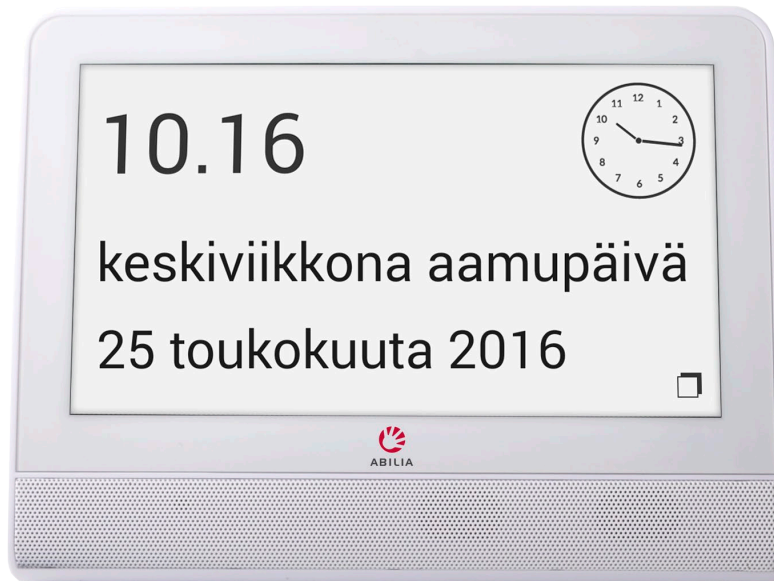

## Sisällys

1.	Johdanto.....	3
2.	Käyttöönotto .....	3
3.	Puhetoiminto.....	4
4.	Taustaväriin vaihtaminen.....	4
5.	Vuorokaudenajat.....	4
6.	Sisäänrakennettu paristo .....	4
7.	MEMOday kytkeminen päälle/pois.....	5
8.	Näyttö .....	5
9.	Hoito/puhdistus .....	5
10.	Ympäristö .....	6
11.	Tekniset tiedot .....	6
12.	Toimitukseen sisältyvät osat .....	6
13.	Säilytys .....	6
14.	Tehdasasetusten palautus.....	7
15.	Yhdenmukaisuus lääkintälaitedirektiivin kanssa.....	7
16.	Turvallisuus ja vastuu .....	7

# 1. Johdanto

MEMOday näyttää päivämäärän ja kellonajan. Näytöllä näkyvät selkeästi kellonaika, viikonpäivä, päivämäärä ja vuorokauden aika. Näytön tiedot voi myös kuulla puhuttuna.

Yön ja päivän näyttö voi estää käyttäjää vahingossa soittamassa omaisille tai lähtemästä ulos keskellä yötä.

MEMOday on sijoitettava keskeiseen paikkaan kodissa. Se liitetään pistorasiaan mukana toimitetun laturin avulla.

MEMOday asetukset on helppo sopeuttaa käyttäjän tarpeisiin.

Sähkökatkoksissa teksti häviää, mutta MEMOday toimii normaalisti verkkovirran palautuessa.

MEMOday asettaa kesä- ja talviajan automaattisesti.

# 2. Käyttöönotto

1. Mieti, kuinka esittelet MEMOday. Osa ihmisistä ei halua käyttää ”apuvälineitä”. Tällaisille ihmisille kellon voi antaa vaikkapa ”lahjana”.
2. Päätä MEMOday sijoituspaikka. Sen on oltava helposti näkyvillä, esim. puhelimen vieressä tai keittiön pöydällä. Varmista, ettei kellosta heijastu valoa ikkunasta tai valaisimista.
3. Liitä oheinen laturi verkkovirtaan ja MEMOday takana olevaan liitäntään.
4. Paina MEMOday takana olevaa *Päälle/Pois*-painiketta niin kauan, että näyttö käynnistyy.
5. Noudata näytön ohjeita ja aseta kieli, maa, kellonaika ja päivämäärä sekä näytöllä näkyvät tiedot. ks luvusta 8. *Näyttö* lisätietoja.
6. Tarkasta, että laturi on aina liitettynä. Näyttö toimii vain, kun MEMOday on liitettynä verkkovirtaan.


*HUOM! Käytä MEMOday vain mukana toimitettua laturia. Ota yhteys maahantuojaan, jos tarvitset uuden laturin.*

### 3. Puhetoiminto

Painamalla näyttöä kevyesti MEMOday lukee ääneen näytöllä olevat tiedot.

Tarkista, että puhetoiminto on käytössä. Ks. luku 8. *Näyttö*.

### 4. Taustaväri vaihtaminen

Painamalla painiketta  MEMOday taustaväri muuttuu vaaleasta tummaksi tai päinvastoin.

### 5. Vuorokaudenajat

MEMOday näyttää tekstin avulla, mikä vuorokaudenaika kulloinkin on.

Ajanjaksot on esiohjelmoitu seuraavasti:

aamu: 06:00 – 09:00

aamupäivä: 9:00 – 12:00

iltapäivä: 12:00 – 18:00

ilta: 18:00 – 23:00

yö: 23:00 – 6:00

Yön ajaksi näytön kirkkaus pienenee automaattisesti.

### 6. Sisäänrakennettu paristo

Jos sähköt katkeavat tai jos kellon ei ole liitetty laturia, näytöllä näkyy ilmoitus, että laitteeseen on liitettävä laturi. Näyttö sammuu minuutin kuluttua virran katkeamisen jälkeen.


Kun MEMOday saa jälleen virtaa (kun laturi liitetään tai kun verkkovirta palautuu), näyttö käynnistyy uudelleen ja näyttää oikean kellonajan, päivämäärän, viikonpäivän ja vuorokaudenajan. Sisäänrakennettu paristo tallentaa asetukset.

Jos MEMOday on ollut pitkän aikaa (useita viikkoja) ilman virtaa, kieli, maa, kellonaika, päivämäärä ja näyttöasetukset on asetettava uudelleen.

## 7. MEMOday kytkeminen päälle/pois


Normaalissa käytössä MEMOday on aina oltava päällä, jotta käyttäjä näkee mitä näytöllä lukee.

Näytön voi sammuttaa painamalla lyhyesti painiketta *Päälle/Pois*.




Jos MEMOday ei käytetä pidempään aikaan, se voidaan sammuttaa kokonaan painamalla pitkään painiketta *Päälle/Pois*, kunnes näytöllä näkyy kaksi valittua toimintoa. Sammuta painamalla .


## 8. Näyttö

Voit valita, mitä tietoja näytöllä näkyy.

Siirry ohjattuun asetukseen painamalla pitkään painiketta *Päälle/Pois*, kunnes näytöllä näkyy kaksi valittua toimintoa. Aloita ohjattu asetusta painamalla .

Ohjatussa asetuksessa on neljä vaihtoa:

- **Valitse kieli.** Kielissä, joiden vieressä on symboli , on puhetoiminto. Kun kieli on valittu, puhetoiminnon symboli on vihreä . Jos puhetoiminto ei ole käytössä tai ei valittu, symboli on punainen . Tee muutokset painamalla symbolia.
- **Valitse maa,** jossa MEMOday käytetään. Kellonaika ja mahdollinen kesä/talviaika esitetään ao. maan käytännön mukaan.
- **Säädä kellonaika ja päivämäärä.** Säädä tämänhetkinen kellonaika, vuosi, kuukausi ja päivämäärä.
- **Valitse näytön asetukset,** valitse mitä näytöllä näkyy:

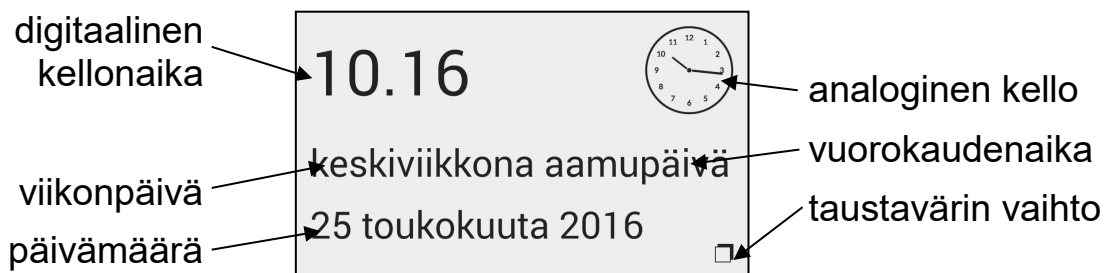

## 9. Hoito/puhdistus

Puhdista MEMOday tarvittaessa nihkeällä, pesuaineeseen kastetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita liuottimia. Kelloa ei saa upottaa veteen.

## 10. Ympäristö

Pakkaus voidaan kierrättää paperijätteenä.

Tuote tai paristo hävitetään elektroniikkajätteenä tai lähetetään takaisin maahantuojalle.

## 11. Tekniset tiedot

Mitat (k x l x s):	140 x 185 x 95 mm
Paino:	0,35 kg
Paristo:	Sisäänrakennettu ladattava 3,7 V litium-ioniakku
Laturi:	5,0 V, 1500 mA (keskiosa positiivinen) Käytä vain kellon mukana toimitettua laturia. Uuden laturin tilaus: Käytä tuotenumeroa <i>508258 Power Supply MEMOday</i> .
Näytön koko:	7 tuumaa
Saatavilla olevat kielet:	ruotsi, norja, tanska, suomi, islanti*, englantia, saksa, hollanti, flaami, ranska, espanja, italia, sloveeni*, bosnia*, kroaatti*, serbia*, tshekki, puola, albaani*, arabia, farsi (Persia)*, turkki, somali*, unkari*, venäjä, kreikka (* ei puhetoimintaa).

## 12. Toimitukseen sisältyvät osat

MEMOday	1 kpl
MEMOday laturi, tuotenro 508258	1 kpl
Käyttöohje	1 kpl

## 13. Säilytys

Säilytä MEMOday sisätiloissa huoneenlämmössä myös silloin, kun se ei ole käytössä.

## **14. Tehdasasetusten palautus**

Palauta tehdasasetukset menemällä asetuksiin ja asettamalla haluttu kieli ja maa, ks. luku 8. *Näyttö*. Puhdista ohjeiden mukaisesti luvussa 9. *Hoito/puhdistus*. Tarkista myös, että laturi on vahingoittumaton. Tilaa vahingoittuneen laturin tilalle uusi maahantuojalta.

## **15. Yhdenmukaisuus lääkintälaitedirektiivin kanssa**

MEMOday markkinoidaan lääkintälaitedirektiivin 934/42/EY mukaisena I luokan lääkintälaitteena henkilöille, joiden kognitiivinen toimintakyky on alentunut.

## **16. Turvallisuus ja vastuu**

Abilia AB on analysoinut tuotteeseen liittyvät riskit standardin SS-EN-14971 mukaisesti.

Tuotteen käyttöönotossa ja päivittäisessä käytössä on aina otettava huomioon turvallisuus. Käyttöohjeessa ei ole mahdollista kuvata kaikkia mahdollisia tuotteen käyttötapoja. Jos et ole varma oletko asettanut tai ottanut tuotteen käyttöön oikein, ota yhteys tuotteen maahantuojaan.

Abilia AB ei vastaa mahdollisista vahingoista, seurausvahingoista tai tappioista, joita syntyy käytön, väärinkäytön, ohjeiden laiminlyönnin, väärin asetusten, väärän kytkemisen tai vastaavan seurauksena. Abilia AB:n taloudellinen vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa tuotteen arvoon.

CE

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden  
Phone +46 (0)8-594 694 00 | [info@abilia.se](mailto:info@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway  
Phone +47 23 28 94 00 | [info@abilia.no](mailto:info@abilia.no) | [www.abilia.no](http://www.abilia.no)

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingway Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom  
Phone +44 (0)1954 281210 | [info@abilia.uk](mailto:info@abilia.uk) | [www.abilia.uk](http://www.abilia.uk)

